

LSG-02 D (145998) / LSG-02 DE (145997)**Montage**

Zur Montage des Gerätes zunächst die links und rechts vom Halterahmen eingedrehten roten Sicherheitsschrauben soweit lösen, bis sich der Rahmen von der Absaugschublade abziehen lässt.

Halterahmen an Tischplatte anschrauben. Vordere Bohrung für die Befestigung 110 mm von der Vorderkante der Tischplatte anbringen. Halterahmen wird mittels 4 x M5-Schrauben für Metalltische bzw. mit bis 5 mm starken Holzschrauben befestigt. Dann die Schublade in die Teleskopschienen einfahren. Die roten Sicherheitsschrauben wieder anziehen, womit der Auszug der Schublade begrenzt wird.

Bedienung

Die Schublade an das Stromnetz anschließen.

1. Wippschalter (grün) betätigen.
2. Die Absaugung sowie der möglicherweise hinten eingesteckte Ausarbeitungsmotor schalten sich über einen Mikroschalter bei ausgezogener Schublade ein.

Justierung der Einschaltautomatik bei der Absaugschublade LSG-02 DE

- 1.) Absaugschublade ganz aus dem Montagerahmen herausziehen. Oben auf dem Gerät befindet sich ein Plastikblindstopfen, darunter das Potentiometer für die Justierung.
- 2.) Absaugschublade einschalten, Automatik einschalten.
- 3.) Potentiometer mit kleinem Schraubendreher vorsichtig ganz nach links bis zum Anschlag drehen.
- 4.) Motor laufen lassen, etwas mehr als niedrigste Drehzahl, empfohlene Drehzahl 5.000 min^{-1}
- 5.) Potentiometer im Uhrzeigersinn sehr langsam und vorsichtig drehen bis zu dem Punkt, an dem die Absaugschublade anläuft.
- 6.) Somit ist die Justierung abgeschlossen.