


Umbauanleitung

REF 174388

Rep-Set Sicherheitsventil 7 bar /
Rep-Set Safety valve 7 bar

für Dampfstrahler/
for steam jet
WASI-STEAM Classic (REF 174993)

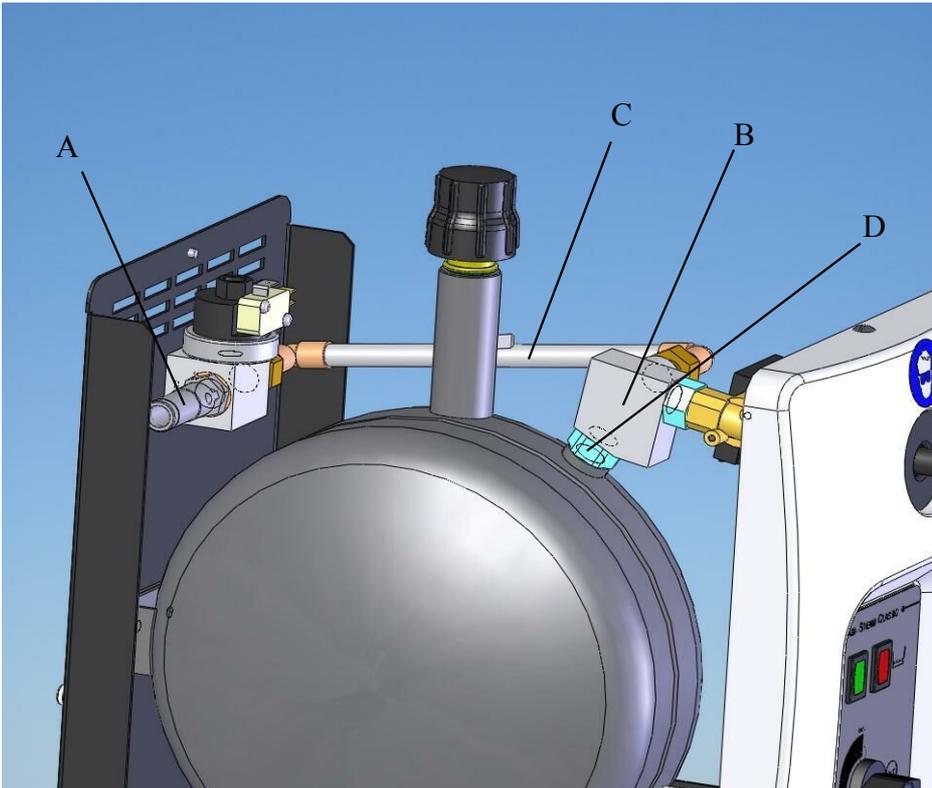

1.)

Schrauben Sie das Ventil [A] heraus und ersetzen es durch das neue Ventil.
Verwenden Sie auch den beiliegenden Cu-Ring.
Unscrew valve [A] and replace it by the new valve.
Please use also the enclosed Cu-ring.

2.)

Sollte Ihr defektes Ventil in den Block [B] eingeschraubt sein, ist dies nicht die aktuelle
Version und Sie benötigen außerdem das Rep-Set Verlegung Druckschalter [C] Art-Nr.:
174383

If your broken valve is screwed into block [B] you do not have the latest version and require also rep-set change of pressure switch [C] part-no. 174383

3.)

Überwurfmutter [D] gelegentlich auf Dichtigkeit überprüfen und ggf. nachziehen.
Please check occasionally the union nut [D] of tightness and retighten if necessary.