

## **Inbetriebnahme LSG-02 D (145998)/ LSG-02 DE (145997)**

### **Montage**

Zur Montage des Gerätes zunächst die Schublade im Halterahmen langsam bis zum Stop nach vorne ziehen. Dann vorsichtig die seitlich auf den Laufschiene sichtbaren, schwarzen Kunststoffhaken in Pfeilrichtung drücken.

Nun lässt sich der Halterahmen von der Absaugschublade abziehen.

Halterahmen an Tischplatte anschrauben.

### **Vordere Bohrung für die Befestigung 110 mm von der Vorderkante der Tischplatte anbringen.**

Halterahmen wird mittels 4 x M5-Schrauben für Metalltische bzw. mit bis 5 mm starken Holzschrauben befestigt.

Dann die Schublade vorsichtig in die Führungsschiene einfahren, bis die Kunststoffhaken hörbar einrasten, und somit der Auszug der Schublade begrenzt wird.

### **Bedienung**

Die Schublade an das Stromnetz anschließen.

1. Wippschalter (grün) betätigen.
2. Die Absaugung sowie der möglicherweise hinten eingesteckte Ausarbeitungsmotor schalten sich über einen Mikroschalter bei ausgezogener Schublade ein.

### **Justierung der Einschaltautomatik bei der Absaugschublade LSG-02 DE**

1. Absaugschublade ganz aus dem Montagerahmen herausziehen. Oben auf dem Gerät befindet sich ein Plastikblindstopfen, darunter das Potentiometer für die Justierung.
2. Absaugschublade einschalten, Automatik einschalten.
3. Potentiometer mit kleinem Schraubendreher vorsichtig ganz nach links bis zum Anschlag drehen.
4. Motor laufen lassen, etwas mehr als niedrigste Drehzahl, empfohlene Drehzahl 5.000 min<sup>-1</sup>
5. Potentiometer im Uhrzeigersinn sehr langsam und vorsichtig drehen bis zu dem Punkt, an dem die Absaugschublade anläuft.
6. Somit ist die Justierung abgeschlossen.